

3M™ Tegaderm™

Apósito Film de Poliuretano

Referencias 1622W-1624W-1626W

○ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

3M™ Tegaderm™ es un apósito transparente, estéril. Está formado por un film de poliuretano transparente revestido por un adhesivo acrílico químicamente inerte, y protegido por un papel soporte.

Semioclusivo, permeable al vapor de agua, oxígeno y otros gases, impermeable al agua y bacterias.

Previene la formación de costra y la irritación cutánea, creando un ambiente húmedo que permite una epitelización y cicatrización más rápida de la úlcera. No provoca irritación o maceración de la piel y alivia el dolor asociado a la deshidratación de la superficie de la úlcera. No tiene capacidad de absorción.

Su estructura es elástica, adaptable a las formas anatómicas y resistente a roturas.

Fácil de aplicar y se adapta al cuerpo, permitiendo el libre movimiento.

Se presenta en sobres individuales que aseguran su esterilidad, con identificación del producto, tamaño del apósito y fecha de caducidad.

○ COMPOSICIÓN

- ✓ Lámina transparente de poliuretano.
- ✓ Adhesivo de acrilato.
- ✓ Papel soporte siliconado.
- ✓ Etiqueta de esparadrapo microporoso e hipoalergénico para anotar fecha de aplicación o revisión del apósito (sólo en la referencia 1624W).
- ✓ No contiene látex.
- ✓ Marcado CE en conformidad con la Directiva Europea 93/42/CEE, transposición a Legislación Nacional RD 414/1996.

○ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Adhesividad.

- a. Resistente a la humedad.
- b. Adherencia a largo plazo sin irritaciones cutáneas.
Adhesión a la piel:
0 horas: 0,7 g/cm.
24 horas: 1 g/cm.

2. Apósito semioclusivo.

- a. **Permeable al oxígeno.** Permite la transmisión del vapor de agua a través del apósito reduciendo la humedad debajo del apósito a lo largo del tiempo.
Índice de transmisión del vapor húmedo:
650 - 700 g / m² / 24 horas.
- b. **Impermeable a los líquidos.** Resistente al agua, posibilita el cuidado corporal diario.

3. Flexibilidad.

- ✓ Se adapta a las zonas anatómicas y mantiene la capacidad de movilidad del paciente.

4. Protección frente a infecciones.

- ✓ Impermeables frente a las bacterias y virus. **Las pruebas de laboratorio han demostrado que la película constituye una barrera frente a los virus VIH-1 y VHB, siempre y cuando el apósito permanezca intacto y no haya fugas.*
- ✓ No se genera proliferación bacteriana bajo el apósito. El número de microorganismos bajo el apósito no es mayor que el de las zonas cutáneas contiguas e inferior al que se observa bajo apósitos de gasa.

5. Favorece una cicatrización plana evitando la formación de queloide.

- ✓ Es transparente a los rayos X (radiotransparente).
- ✓ Esterilización mediante radiación gamma.



○ INDICACIONES

Los apósitos transparentes 3M™ Tegaderm™, están indicados en:

- ✓ Tratamiento de úlceras por presión de grado I y II, manteniendo el entorno húmedo lo que facilita el proceso de cicatrización.
- ✓ En heridas que requieran ser impermeabilizadas y que tengan poco exudado.
- ✓ Para cubrir zonas de piel que necesiten estar impermeabilizadas.
- ✓ También se puede utilizar para facilitar el desbridamiento autolítico en las úlceras.

Contraindicaciones: No se han descrito.

○ APLICACIÓN

- ✓ Abrir el envase y sacar el apósito estéril.
- ✓ Despegar el papel impreso del apósito, exponiendo la superficie adhesiva.
- ✓ Colocar el apósito sobre la úlcera y presionar suavemente sobre la piel.
- ✓ Quitar el marco lentamente, alisando los bordes del apósito.
- ✓ Aplicar una presión firme para mejorar la adhesión.

Ventajas:

- ✓ Se aplica mediante un marco de colocación que evita la aplicación con tensión y la formación de arrugas. El marco permite el uso de guantes, evitando el contacto de las manos del sanitario profesional con el apósito.
- ✓ Cuenta con esquinas redondeadas que mejoran la adaptación en zonas anatómicamente difíciles y que impiden que el apósito se desprenda del paciente fácilmente.

○ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- ✓ Almacenar a temperatura ambiente.
- ✓ Evitar el calor y humedad excesivos.
- ✓ La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 5 años a partir de la fecha de fabricación del apósito.

○ INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CN	Referencias	Medidas (cm.)	Presentación Uds/Caja
498352	1622W	4,4 x 4,4 cm.	10
	1622W	4,4 x 4,4 cm.	100
498360	1624W	6 x 7 cm.	10
	1624W	6 x 7 cm.	100
476887	1626W	10 x 12 cm.	10
	1626W	10 x 12 cm.	50



Dpto. Curación de Heridas Crónicas
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

3M Health Care
St. Paul, MN 55144-1000

