

FICHA TECNICA DERMAX

Descripción del producto

DerMax es un apósito estéril e inerte impregnado con una pomada de Ionógenos Polihidratados (PHI-5) y está destinado a la curación de heridas crónicas. Los PHI-5 contienen una mezcla sintética de oligoelementos (iones metálicos) que normalmente también se observan en el suero y los exudados de una herida. El portador, un material apósito de un tejido de malla de acetato, está impregnado con PHI-5. El portador de acetato es inerte. La fórmula PHI-5 es liberada en la superficie de la herida después de la aplicación del apósito en la misma.

Propiedades del producto

DerMax está destinado al uso en heridas crónicas y agudas. DerMax normaliza el entorno de la herida reduciendo la inflamación excesiva, y facilita por tanto la reepitelización de la herida. Las metaloproteinasas de la matriz (las MPM) juegan un papel importante tanto en la degradación como en la regeneración de la matriz del tejido. La reepitelización guarda relación con una distribución correcta de las MPM dentro del entorno de la herida. DerMax posee propiedades específicas destinadas a asistir el entorno de la herida regulando el nivel de humedad y acidez en la superficie de la herida durante el proceso de cicatrización. DerMax también ayuda a proteger las heridas contra traumas mecánicos. DerMax permite el drenaje adecuado de los exudados de la herida.

Indicaciones de DerMax

DerMax debe aplicarse en heridas problemáticas crónicas o en heridas donde resulta deseable un proceso de curación más rápido y fácil, incluyendo los siguientes tipos de heridas:

Heridas severas agudas

- Quemaduras
- Heridas quirúrgicas
- Heridas traumáticas
- Otras heridas agudas que requieren una epitelización rápida

Heridas severas crónicas

- Úlceras de pierna
- Úlceras diabéticas
- Úlceras por decúbito
- En conjunción con el uso de corticoesteroides

Contraindicaciones

DerMax no debe utilizarse en pacientes con una sensibilidad extrema conocida al acetato o los PHI-5.

Instrucciones de uso

1. Inspeccione cuidadosamente la herida.
2. Limpie la herida según las prácticas generales del cuidado de heridas.
3. Retire el apósito DerMax de su envoltorio de plástico. Si el envoltorio de plástico ha sido abierto o está dañado, deseche el apósito DerMax, visto que ya no es estéril.
4. Retire los papeles delante y detrás del apósito DerMax.
5. Aplique el apósito DerMax directamente sobre la herida. Asegure un contacto máximo con la herida.
6. Fije el apósito DerMax con esparadrapo adhesivo (perforado)

Observación: En caso de heridas húmedas o mojadas, puede aplicarse un apósito secundario encima del DerMax para proveer absorción.

Cambiar el apósito

1. Retire el apósito secundario
2. Quite suavemente el DerMax. Si el apósito DerMax se adhiere a la herida, humedecer el apósito para facilitar su desprendimiento
3. Inspeccione y limpie la herida según las prácticas generales de cuidado de heridas.
4. Aplique un nuevo apósito DerMax

De uso único

DerMax ha sido esterilizado por rayos gamma. La esterilidad se garantiza en envoltorios no dañados, vencidos ni abiertos. DerMax no puede ser reesterilizado o reusado.

Embalaje

Cantidad	Tamaño	Referencia
10	5 cm x 6 cm	83DRX00506
5	8 cm c 10 cm	83DRX00810

Almacenamiento

Almacene a temperatura ambiente, en un lugar seco y fuera de la luz del sol directa. DerMax también puede almacenarse en frío, pero no en un congelador (5-25°C).

