
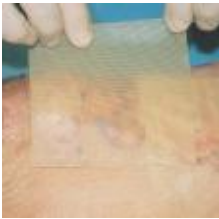


Nombre comercial	Urgotul S.Ag
Tipo de producto	Apósito lípido-coloide con Sulfadiazina Argéntica
Empresa	Urigo
Fotos	 
Indicaciones	Urgotul® S.Ag está indicado para las curas locales de quemaduras de 2º grado superficiales, intermedias o profundas con riesgo de sobreinfección.
Descripción del producto	<p>Interfase lípido coloide impregnada de sulfadiazina argéntica.</p> <p>COMPOSICIÓN: Urgotul® S.Ag es un apósito hidrocoloide, no adhesivo, no oclusivo, que no se adhiere a la herida, constituido por una trama de poliéster impregnada de partículas hidrocoloides (carboximétilcelulosa) en una red de vaselina y de sulfadiazina argéntica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eficaz frente a 117 cepas de las bacterias hospitalarias más habituales: Gram + (Staphylococcus Aureus y Staphylococcus Meti-R), Gram - (Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias) - No se adhiere ni a la herida ni a la piel perilesional con lo que los cambios son completamente atraumáticos e indoloros. <p>PRESENTACIÓN: En sobre individuales estériles, listos para su uso.</p> <p>MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Radioesterilización.</p>
Modo de Empleo	<ul style="list-style-type: none"> _ Limpiar la herida con suero fisiológico. _ En caso de utilizar un antiséptico, de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar URGOTUL® S.Ag _ Retirar el protector de Urgotul® S.Ag. _ Colocar directamente Urgotul® S.Ag sobre la quemadura. _ Cubrir Urgotul® S.Ag con compresas estériles mantenidas por una banda no oclusiva o un esparadrapo. _ El cambio de Urgotul® S.Ag se efectuará cada 24 a 48 horas en función de la evolución de la quemadura curada. _ El periodo de tratamiento se limita a un mes. Sin embargo, una quemadura superficial curada en régimen ambulatorio que no haya cicatrizado después de 14 días debe tratarla un especialista.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> _ El tratamiento con Urgotul® S.Ag se efectuará únicamente bajo vigilancia médica. _ Al utilizar el apósito sobre una gran superficie lesionada o como tratamiento prolongado, es posible que haya riesgos de un efecto sistémico vinculado con la sulfadiazina argéntica (riesgo de complicaciones generales hematológicas, renales, intestinales y cutáneas). _ Urgotul® S.Ag puede adherirse a los guantes quirúrgicos. Por esta razón, se recomienda humedecer los guantes con suero fisiológico para facilitar el manipulado de Urgotul® S.Ag. _ No se recomienda el uso de Urgotul® S.Ag. con otros tratamientos locales.

	_ Guardar Urgotul® S.Ag lejos del calor y a una temperatura inferior a 25°.			
Presentaciones	Nombre	Medidas	Cantidad	Código Nacional
	Urgotul S.Ag	10 x 12	5	265868.4
	Urgotul S.Ag	15 x 20	5	155486.4