


Nombre comercial	Urgotul
Tipo de producto	Apósito lípido-coloidal
Empresa	Urgo
Fotos	
Indicaciones	<p>Urgotul® está indicado para las curas locales de heridas agudas (quemaduras superficiales, dermabrasiones, heridas traumáticas) y crónicas en fase de granulación y de epitelización (úlceras vasculares y úlceras por presión)</p> <p>Urgotul® también está indicado para el tratamiento de las heridas provocadas por una epidermólisis ampollosa hereditaria.</p>
Descripción del producto	<p>Apósito lípido-coloidal no oclusivo.</p> <p>COMPOSICIÓN: Urgotul® es un apósito hidrocoloide no oclusivo constituido de una trama de poliéster impregnada de partículas hidrocoloides dispersadas en una red de vaselina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se adhiere a la herida ni a la piel perilesional por lo que los cambios de apósito son completamente atrarumáticos e indoloros - Flexible y adaptable Urgotul® está particularmente indicado para heridas de cualquier localización. <p>PRESENTACIÓN: En sobres individuales estériles, listos para su uso.</p> <p>MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Radioesterilización.</p>
Modo de Empleo	<ul style="list-style-type: none"> _ Limpiar la herida con suero fisiológico. _ En caso de utilizar un antiséptico, de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar Urgotul®. _ Retirar el protector de Urgotul®. _ Colocar directamente Urgotul® sobre la herida. _ Con objeto de adaptar el tamaño del apósito a la lesión, Urgotul® puede recortarse, aunque utilizando material estéril. _ Cubrir Urgotul® con un apósito secundario: compresas estériles mantenidas mediante una venda elástica, un esparadrapo o una red tubular. _ El cambio de Urgotul® se efectuará cada 2 a 4 días en función de la herida y de su evolución. _ En el caso de las heridas provocadas por la epidermólisis ampollosa hereditaria, el cambio se realizará cada 1 a 3 días.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> _ Urgotul® puede adherirse a los guantes quirúrgicos (látex). Por ello se recomienda humedecer los guantes con suero fisiológico para facilitar el manipulado de Urgotul®. _ En presencia de signos clínicos de infección local, el tratamiento puede continuar, en función de la valoración del médico. _ En caso de herida profunda, no hace falta aplicar varias capas de Urgotul

	_ No doblar			
Presentaciones (* Reembolsables por el Sistema Nacional de Salud)	Nombre	Medidas	Cantidad	Código Nacional*
	Urgotul	10 x 10 cm	3*/5	492181.6*/376350.9
	Urgotul	15 x 15 cm	3*/5	494021.3*/376400.1
	Urgotul	10 x 40 cm	10	229716.6