


Nombre comercial	Urgosorb compresa y mecha
Tipo de producto	Apósitos absorbente de alginato cálcico y partículas hidrocoloide
Empresa	Urigo
Fotos	
Indicaciones	<p>CICATRIZACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgosorb® es un apósito adecuado a las curas locales de las lesiones con exudación de moderada a alta, en particular las úlceras por presión de decúbito, las heridas quirúrgicas y las heridas profundas. - Urgosorb® se puede utilizar en lesiones que presentan signos clínicos de infección siempre y cuando se asocie con un tratamiento médico adaptado. - Urgosorb® mecha está indicado en el cuidado local de heridas cavitadas o tunelizadas. <p>HEMOSTASIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgosorb® favorece la hemostasis primaria de las heridas agudas o crónicas. - Urgosorb® mecha está indicado en los cuidados locales de las lesiones cavitarias hemorrágicas.
Descripción del producto	<p>Urgosorb® es un apósito estéril absorbente compuesto por fibras de Alginato de calcio y partículas hidrocoloides (carboximetilcelulosa), polímeros de origen natural conocidos por su fuerte poder de absorción y de gelificación en medio húmedo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acelera la desbridación por gelificación de sus componentes al entrar en contacto con los exudados de la lesión - Absorción vertical, sin fugas laterales por lo que evita el riesgo de maceración - Por activación plaquetaria, favorece la hemostasis primaria de las lesiones agudas y crónicas que presentan sangrado. <p>PRESENTACIÓN: Urgosorb® se presenta en forma de compresa y mecha en sobres individuales estériles listos para su uso.</p> <p>MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Radioesterilización.</p>
Modo de Empleo	<p>1 - Preparación de la lesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpiar la lesión según las técnicas habituales. Secar cuidadosamente el contorno de la lesión con una compresa estéril. <p>2a - Colocación de Urgosorb ® compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elegir aquel formato de Urgosorb® que cubra la herida entre 1 cm y 2 cm de piel perilesional sana. - En el caso de úlceras en las extremidades inferiores se puede humedecer la compresa con una solución de suero fisiológico antes de aplicar. - La gran flexibilidad de Urgosorb® le permite adaptarse inmediatamente a la superficie de la lesión. Cubrir Urgosorb® con un apósito secundario: doble espesor de compresas y vendaje no muy apretado o esparadrapo.

	<p>2b - Colocación de Urgosorb® mecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ante heridas tunelizadas y profundas (escaras anfractuosas, seno pilonidal) aplicar Urgosorb® mecha de manera suelta sin ejercer una presión excesiva. - En el caso de úlceras de pierna se puede humedecer la compresa con una solución de suero fisiológico antes de aplicar. - Mediante su gelificación en contacto con los exudados, Urgosorb® mecha se adaptará a las paredes de la cavidad. <p>3 - Revisión y cambio del apósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgosorb® compresa se cambiará en cuanto alcance el estado de saturación, es decir, cuando el exudado traspase y aparezca en el apósito secundario. La frecuencia de renovación dependerá del nivel de exudación de la lesión: de diariamente, en el caso de lesiones con abundante exudación y recubiertas de restos fibrino-necróticos o infectadas, a cada dos días en caso de lesiones limpias de exudación moderada. - Retirar el apósito secundario. La integridad del apósito y del gel permiten una fácil retirada de Urgosorb®, con un solo gesto y sin que se fragmente. - Ante úlceras de pierna, se podrá humedecer Urgosorb® con suero fisiológico para facilitar su retirada. - Urgosorb® mecha también se retira con suma facilidad con un solo gesto. 			
Precauciones	<p>Al no ser reabsorbible, Urgosorb® no debe utilizarse como compresa quirúrgica implantable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgosorb® no debe utilizarse durante la fase de placa de necrosis seca, ni sobre heridas poco exudativas, ni sobre quemaduras de 3° grado. - Una vez limpia la lesión y menos abundante el exudado, proseguir el tratamiento local con Algoplaque®. - No utilizar en caso de deterioro del protector estéril. - Tiempo de conservación: 3 años. 			
Presentaciones (* Reembolsables por el Sistema Nacional de Salud)	Nombre	Medidas	Cantidad	Código Nacional*
	Urgosorb compresa	10 x 10 cm	3*	496000.6
	Urgosorb compresa	10 x 20 cm	3*	496018.1
	Urgosorb mecha	30 x 2'2 cm	3*	496026.6